

# Mikrozid® Liquid keimfiltriert



Einen Überblick aller zum Präparat Mikrozid® Liquid keimfiltriert vorliegenden Gutachten/ Literatur finden Sie im Internet unter [www.schuelke-mayr.com](http://www.schuelke-mayr.com)

Für Ihre individuellen Fragen:  
Produkt-/Anwendungsberatung  
Telefon 0 40 / 521 00-666

- keimfiltriert (0,2 µm) gem. Anforderungen EU-GMP guideline
- gebrauchsfertig
- aldehydfrei
- farbstofffrei
- DGHM-gelistet

## Präparate-Typ

Mikrozid® Liquid keimfiltriert ist ein modernes gebrauchsfertiges, aldehydfreies Schnell-Desinfektionspräparat auf Basis von Alkoholen.

## Anwendungsgebiete

Mikrozid® Liquid keimfiltriert ist vorgesehen zur Sprüh-Anwendung in allen Bereichen mit erhöhtem Kontaminationsrisiko und dem Erfordernis kurzer Einwirkzeiten

## Mikrobiologische Wirksamkeit

Mikrozid® Liquid keimfiltriert wirkt u. a. gegen:

- Bakterien (inkl. TB)
- Pilze
- HBV
- HIV

## Produktdaten

- **Zusammensetzung**  
100 g enthalten: 25 g Ethanol (94 %ig), 35 g Propan-1-ol
- **Chemisch-physikalische Daten:**

Aussehen:	klare, farblose Flüssigkeit
Dichte (20 °C):	ca. 0,895
Viskosität:	< 15 Sek. (Auslaufzeit nach DIN 53211)
Temperaturstabilität:	- 5 °C bis + 40 °C
pH-Wert:	ca. 6,0
Flammpunkt:	27 °C (DIN 51 755)

## Lieferformen/Verpackungseinheiten

Gebindegrößen	Verpackungseinheiten	Art. Nr.
1-l-Flasche	10 x 1 l	109132
10-l-Kanister	1 x 10 l	109133

## Einwirkzeiten

Wirksamkeiten	Einwirkzeit
Bakterien, Pilze (gemäß DGHM-Richtlinien bei verkürzten Einwirkzeiten)	1 Min.
<b>Bereits nach Euro-Normen getestet:</b>	( 20 °C )
<b>EN 1276</b> (bakterizid, mit Belastung)	1 Min.
<b>EN 1650</b> (fungizid, mit Belastung)	1 Min.
<b>EN 13697</b> (bakterizid, mit/ohne Belastung, quant. Oberflächenversuch)	1 Min.
<b>EN 13697</b> (fungizid, mit/ohne Belastung, quant. Oberflächenversuch)	1 Min.

## Anwendungshinweise

Mikrozid® Liquid keimfiltriert unverdünnt auf Gegenstände und Flächen ausbringen und kurz einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung (z.B. 40 ml/m<sup>2</sup>) achten. Ausbringung maximal 50 ml/ m<sup>2</sup>. Ggf. überschüssige Präparatemengen mit Einmaltuch entfernen. Besonders alkoholempfindliche Flächen, wie z. B. Acrylglas, dürfen nicht behandelt werden

## Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien

- Xi:** Reizend  
**R10:** Entzündlich  
**R41:** Gefahr ernster Augenschäden  
**R67:** Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen  
**S23:** Aerosol nicht einatmen  
**S26:** Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren  
**S39:** Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen  
**S51:** Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden

## Besondere Hinweise

### Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Nicht einnehmen. Das Tragen von Schutzhandschuhen (z.B. aus Butylkautschuk) wird empfohlen.

Mikrozid® Liquid keimfiltriert ist äußerst materialverträglich bei Metallen und Kunststoffen (außer Acrylglas und alkoholempfindlichen Lacken).

Bitte beachten Sie den Brand- und Explosionsschutz beim Einsatz von alkoholischen Desinfektionsmitteln in der BR-Regel „Desinfektionsarbeiten im Gesundheitsdienst“.

### Hinweise für die Schweiz:

Giftklassenfrei

BAG T Nr.: 68834  
 BAG E Nr.: 1274



Schülke & Mayr GmbH ist zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 13485 (Reg.-Nr. 004567 MP21) und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem gemäß Öko-Audit-Verordnung (Reg.-Nr. DE-S-150 00003).

Schülke & Mayr GmbH  
 22840 Norderstedt  
 Telefon 040 / 521 00-0  
 Telefax 040 / 521 00-318  
 www.schuelke-mayr.com  
 mail@schuelke-mayr.com

Schülke & Mayr AG  
 Obere Zäune 12  
 CH-8001 Zürich  
 Telefon (01) 252 98 02  
 Telefax (01) 252 98 27  
 mail.ch@schuelke-mayr.com

Schülke & Mayr Ges.m.b.H  
 Zieglergasse 8  
 A-1070 Wien  
 Telefon (1) 523 25 01  
 Telefax (1) 523 90 35 79  
 office@schuelke-mayr.at